




Hydragel

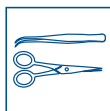

Lian kiinni kuivumista sekä mikrobin lisääntymistä ja leviämistä estävä esikäsittelyaine instrumenteille.

Käyttökohteet	Esikäsittelytuote tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. Hydragel estää orgaanisen lian kiinnittymisen ja kuivumisen sekä mikrobin lisääntymisen käytetyissä instrumenteissa.			
Tuoteominaisuudet	Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle mikrobeja läpäisemättömän pinnan. Geelikalvo estää lian kuivumisen kiinni instrumentteihin sekä mikrobin lisääntymisen ja leviämisen. Vaikutus kestää 5 vrk. Tuotetta voidaan käyttää tarvittaessa myös pesutehosteena hankalasti puhdistuville instrumenteille. Sopii yleisesti käytössä oleville materiaaleille. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta.			
Käyttö- ja annostusohje	Käytä kannellista säilytys/kuljetuslaatikkoa. Sumuta esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.			
Huomioitavaa	Esikäsittelyaineen alle ei saa jäädä kemikaaleja, jotka voivat syövyttää tai vaurioittaa metalleja. Puhdista roiskeet vedellä. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.			
Koostumus	Tehoaine			
	Rasvahappojen alkanoliaminusuoloja	5 - 15%		
	Ionittomia tensidejä	< 5%		
	Säilöntäainetta			
	Korroosionestoainetta			
	Vaahdonestoainetta			
Tuotteen pH	9.0 heikosti emäksinen			
Varastointi	<28°C. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.			
Valmistusmaa	SUOMI			
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD -muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali.			
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.